




1. Nasadíte odberový adaptér na sliny na skúmavku.

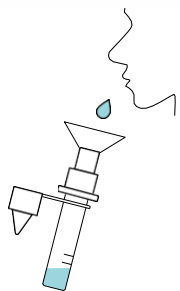


2. Odberový adaptér na sliny umiestnite blízko pier a pomaly naplňte do adaptéra. Objem slín musí ležať medzi dvoma ryskami vyznačenými v spodnej časti skúmavky. (5 až 10 mm) od dna.

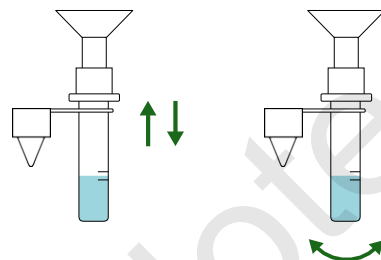


3. Jemným pohybom zo strany na stranu a hore-dole zabezpečte, aby slina stiekla do skúmavky. Zabraňte peneniu slín.

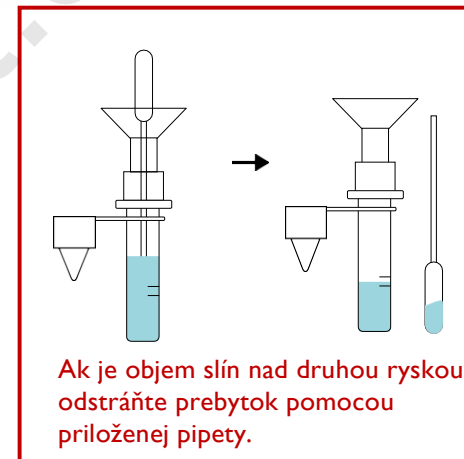


Ak je objem slín nad druhou ryskou, odstráňte prebytok pomocou priloženej pipety.

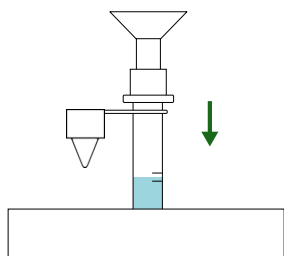


4. Položte skúmavku do stojana alebo inej pomôcky, ktorá zabezpečí jej vzpriamenú pozíciu.

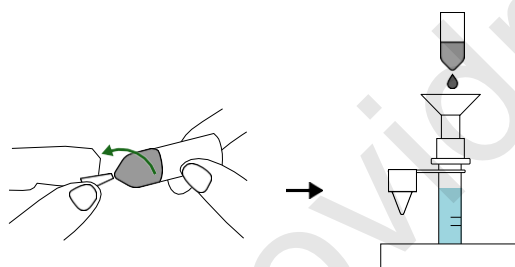


5. Odloňte špičku riediaceho roztoku a vlejte celý jeho obsah do skúmavky.

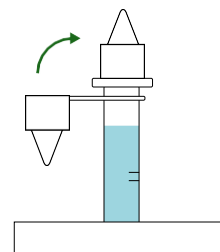


6. Nasadíte viečko odberovej skúmavky a skúmavku pevne uzavrite.

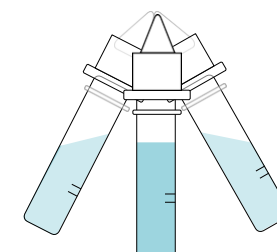

7. Krúživým pohybom skúmavky dostatočne premiešajte jej obsah

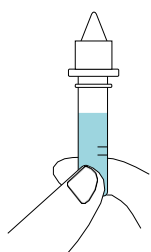

8. Stlačte spodok odberovej skúmavky 10 krát, aby sa zabezpečilo dokonalé premiešanie jej obsahu.

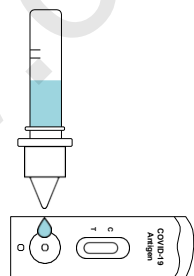

9. Pridajte 3 kvapky zmesi na test.


Odčítajte výsledok testu do 10 minút
Upozornenie: Neodčítavajte výsledok testu po čase dlhšom ako 20 minút.



Pozitívny



Negatívny

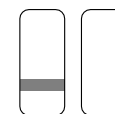

Neplatný

Distribútor:

Agentúra HARMONY v.o.s.
Piaristická 1
949 01 Nitra
harmony@harmony-vos.sk